



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP nº 05/2024

Revisão 01

Página 1/2

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por

Dr^a Gêssica Tenório Rodrigues
Biomédica

Dr^a Katgeane Neves da Silva
Biomédica

Dr Marcelo Brasil da Silva
Gerente/Bioquímico
DAD/SEMUSA

Dr^a Alessandra Vidal Borges
Biomédica
RT DAD/SEMUSA

POP Nº 05/2024

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

1. APLICAÇÃO

1.1 Descrever os procedimentos relacionados com a supervisão, manutenção e calibração de equipamentos envolvidos, direta ou indiretamente, na rotina dos laboratórios das Unidades de Urgência e Emergência, Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde, Laboratório de Citologia e Laboratório Central Municipal.

2. DEFINIÇÕES

2.2 Medidas de controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, reduzir e/ou eliminar um dano físico e/ou funcional que comprometa a qualidade e/ou funcionamento de determinado equipamento.

2.3 Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento, apresentando data, situação e identificação do equipamento assim como do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

3. TIPOS DE MANUTENÇÃO

3.1 Manutenção Preventiva – caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, com rotina pré-estabelecida, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das configurações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de uso e degradação.

3.2 Manutenção Corretiva – caracterizada por serviços de adequação dos espaços e sistemas às normas e legislações, de modo a garantir a segurança e saúde dos usuários e a regularidade das edificações.

3.3 Manutenção Corretiva De Emergência – caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos usuários.

4. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ANEXO I)

4.1 Manutenção Preventiva: Dever ser realizada após cada uso ou quando for necessário.

4.2 Manutenção Corretiva e/ou emergencial: Imediata sempre que houve danos e prejuízos a rotina.

Ação	Período manutenção
Limpar o equipamento (Obs: Nunca fazer limpeza com equipamento ligado)	Após cada uso
Qualquer impureza aderente deverá ser removida	Quando necessário
Limpeza geral	Anual
Mau funcionamento/ Defeito	Imediata



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP nº 05/2024		Revisão 01		Página 2/2	
Elaborado por:		Revisado por:		Aprovado por	
Dr ^a Gêssica Tenório Rodrigues Biomédica		Dr ^a Katgeane Neves da Silva Biomédica		Dr Marcelo Brasil da Silva Gerente/Bioquímico DAD/SEMUSA	
				Dr ^a Alessandra Vidal Borges Biomédica RT DAD/SEMUSA	

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

5.1 Qualquer anomalia verificada no equipamento deverá ser acionada a assistência técnica e este não deverá ser colocado em operação, devendo ser fixada uma etiqueta de fora de serviço.

6. REFERÊNCIAS

VILLANUEVA, M.M. **A importância da manutenção preventiva para o bom desempenho da edificação.** Rio de Janeiro: UFRJ / Escola Politécnica, 2015.

ABREU, R.A. **Eficácia da Manutenção Preventiva.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.9.n.03. mar. 2023. ISSN - 2675 – 3375



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO - DAD



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP nº 05/2024

Revisão 01

ANEXO I

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por

Dr^a Géssica Tenório Rodrigues
Biomédica

Dr^a Katgeane Neves da Silva
Biomédica

Dr Marcelo Brasil da Silva
Gerente/Bioquímico
DAD/SEMUSA

Dr^a Alessandra Vidal Borges
Biomédica
RT DAD/SEMUSA

FICHA DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

DATA	PREVENTIVA	CORRETIVA	EQUIPAMENTO	RESPONSÁVEL
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		
	()	()		

Observações: _____



Assinado por **Alessandra Vidal Borges** - BIOMEDICA - RESPONSÁVEL TECNICA - Em: 26/09/2024, 16:13:06



Assinado por **Marcelo Brasil Da Silva** - Gerente de Laboratório - Em: 23/09/2024, 15:40:26



Assinado por **Géssica Tenório Rodrigues** - Biomédica - Em: 23/09/2024, 15:21:40



Assinado por **Katgeane Neves Da Silva** - BIOMEDICA - Em: 23/09/2024, 15:12:12